



B15 - Soutien-gorge de stabilisation des implants

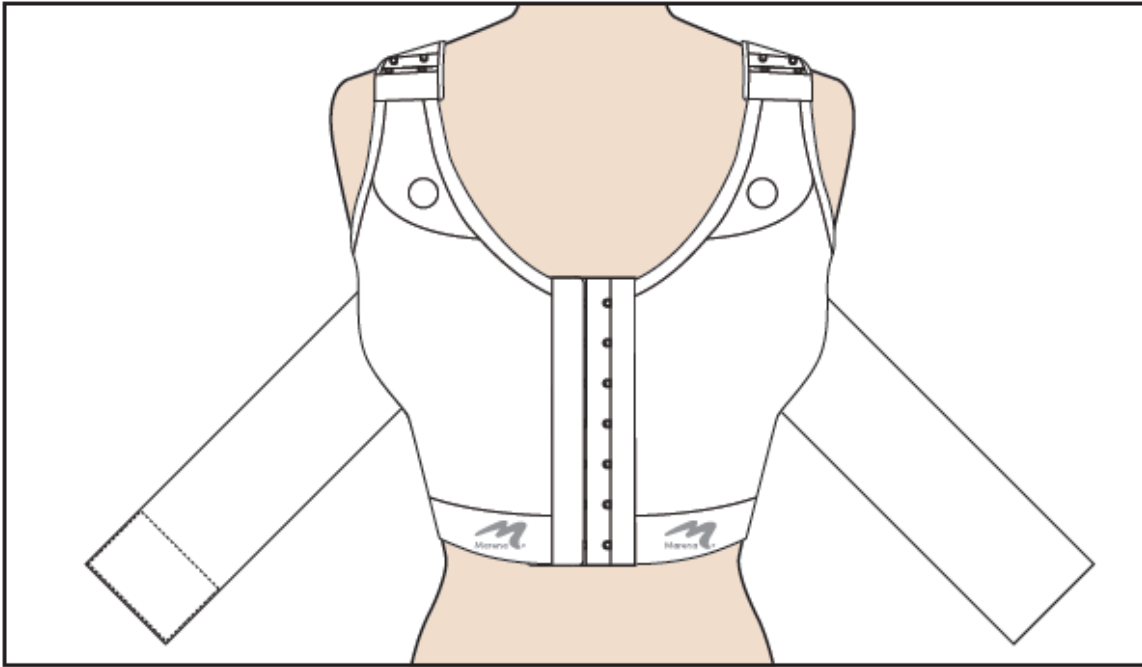

Tout d'abord, glissez chaque bras dans les emmanchures ou les manches. Fermez les agrafes et/ou la fermeture éclair à l'avant, en utilisant le cran du milieu ou la position la plus confortable pour commencer. Vous pouvez ensuite ajuster pour trouver la position qui vous convient le mieux. Après avoir fermé l'avant, ajustez les bretelles d'épaule pour qu'elles soient uniformes et dans la position la plus confortable.

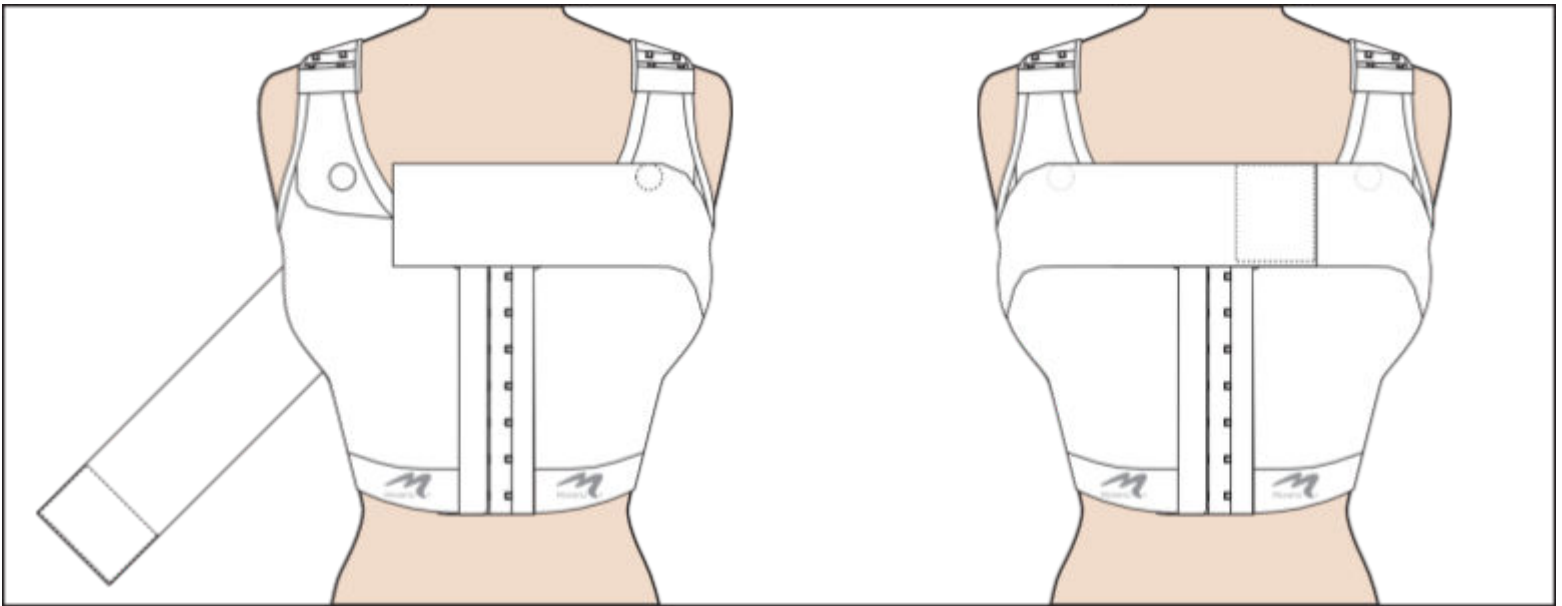

Deuxièmement, positionnez la bande du côté gauche de manière à ce que le bord supérieur de la bande soit aligné avec le bord supérieur du repère de positionnement.

Troisièmement, positionnez la bande du côté droit de façon à ce que le bord supérieur de la bande soit aligné avec le bord supérieur du repère de positionnement, puis fixez la bande auto-agrippante (scratch) sur la bande du côté gauche.